


**** 新型コロナウイルスPCR検査の採取手順について ****

***キットの内容について

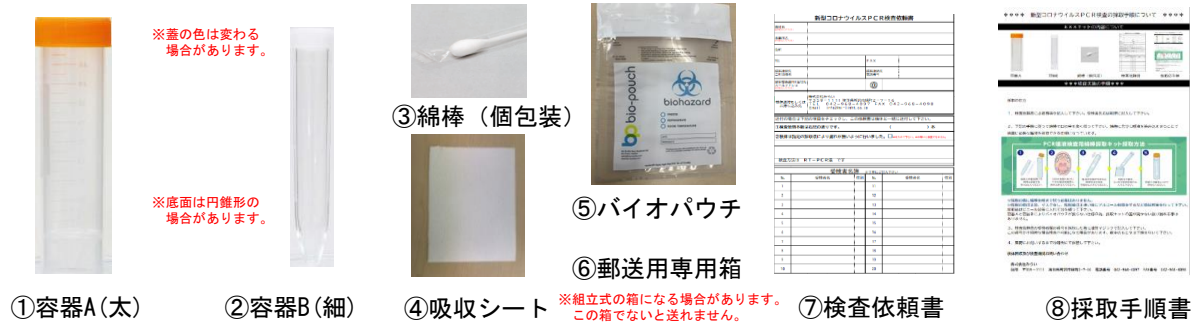


検査実施の手順

【採取の仕方】 <<※唾液採取前30分は飲食をしないでください>>

1. 検査依頼書に必要事項を記入してください。※文字を読み取れるようにご記入ください。文字が不明瞭な場合、結果報告までにお時間を頂戴してしまう可能性があります。
2. 下記の手順に従って、綿棒で口の中をよく拭いて下さい。綿棒に十分に唾液を染み込ませることで、検査に必要な量の唾液を採取できる仕様になっています。中の液体は、捨てたり、飲みこんだりしないようにご注意ください。(この液体は、新型コロナウイルスを不活化させる液体です)

PCR唾液検査用綿棒採取キット採取方法

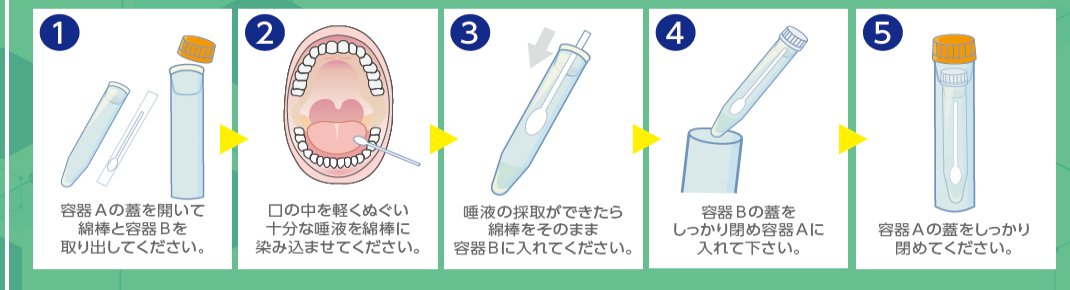

※採取の際に綿棒を喉まで入れる必要はありません。※採取は感染対策を充分とった上で行ってください。容器Aと容器Bとバイオパウチを使用して三重オーバーパックにしているため、容器の蓋が開かない限り、中身が漏れる事はありません。

3. 油性マジックで、容器A(太い方)の蓋に【検査依頼書の受験者名簿の名前の横のNo】を、容器A(太い方)の側面白色部分に【氏名(フルネーム)]を、それぞれ記入してください。文字が不明瞭な場合、検査不可能になる場合があります。数字の6と9は下線を引いてください。(採取人数が多い場合は、依頼書名簿を確認しながら、間違いの無いようにご記入ください。)
4. 容器と吸収シートをバイオパウチの切れ込みの穴から入れ、白いシールを剥がし、封をしてください。容器と吸収シートを入れたバイオパウチと検査依頼書を、同封した箱に入れてください。

5. 郵便局にお持ち込みいただき、ゆうパックで下記の住所宛てに着払いで発送してください。

※品名欄には『新型コロナウイルス検体在中 不活化済み 3重梱包済み』とご記入をお願いします。

※箱の【UN3373】の文字が隠れないよう、他の側面に送付伝票を貼り付けてください。

※ゆうパック以外の運送業者ではお取扱いできない場合がございますので、必ずゆうパックで送付してください。※ゆうパックを発送する際は、直接郵便局にお持ち込みください。ポストからは発送できません。



検体回収及び検査機関 お問い合わせ先

株式会社みらい

住所 〒359-1111 埼玉県所沢市緑町2-7-13 電話番号 042-968-4097 FAX番号 042-968-4098